

REF VILS-402

Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антител к лейшманиозу (LSH Ab) у кошек и собак в цельной крови, сыворотке или плазме.

Состав набора:

Экспресс-тест: кассета, упакованная в алюминиевый пакет-10 шт.
Пипетка-10 шт.

Флакон с капельницей с буферным раствором – 1 шт.

Материал для исследования:


Сыворотка, плазма или цельная кровь. Образцы цельной крови с антикоагулянтом следует анализировать в течение 24 часов после взятия. Если ожидается задержка между отбором образцов и проведением анализа, образец следует хранить в холодильнике от +2 до +8 °C не более 48 часов, но не замораживать. Образцы сыворотки или плазмы должны быть проанализированы, если это возможно, немедленно, в противном случае их необходимо хранить, при температуре от +2 до +8 °C не более 72 часов. Если требуется более длительное хранение, сыворотку и плазму можно заморозить и хранить при температуре минус 20 °C.

Методика проведения анализа:

!!! Убедитесь, что тест-кассета, образец и буфер достигли комнатной температуры (15-30 °C) перед тестированием.

1. Извлеките тест из упаковки и разместите на сухую, ровную поверхность.
2. Укажите идентификационный номер пациента на кассете. Сразу приступайте к выполнению теста.
3. Отберите с помощью пипетки, входящей в набор, 1 каплю исследуемого образца (10 мкл) и внесите образец в лунку экспресс-теста (S).
4. Добавьте 2 капли буферного раствора (80 мкл) с помощью флакона с капельницей в ту же лунку экспресс-теста (S).
5. В течение 10 минут интерпретируйте результаты теста. Интерпретация более чем через 15 минут считается некорректной.

Интерпретация результатов:

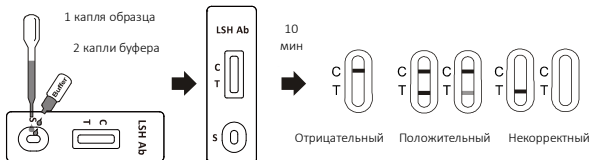

Положительный: две полосы в области тестовой линии (Т) и контрольной линии (С).

Отрицательный: только линия (С) – контрольная.

Некорректный: только линия (Т) – тестовая, либо отсутствие обеих линий. Возможен при нарушении условий хранения или проведения анализа. Необходимо провести тест повторно с использованием нового образца и теста.

Наиболее информативно определение антител начиная с 2-3 месяцев после заражения. Исследование необходимо повторить через 1-2 месяца после лечения.

Условия хранения:

-Хранить при комнатной температуре, либо в холодильнике (+2-+30 °С).

- Тест стабилен в течение срока годности, указанного на упаковке, и должен оставаться в запечатанном пакете до использования.

- Не замораживать.

Меры предосторожности:

- ✓ Не использовать после истечения срока годности.
- ✓ Не использовать повторно компоненты набора, не смешивать компоненты из разных серий.
- ✓ Соблюдать установленные меры предосторожности и следовать стандартным процедурам для утилизации отходов класса Б, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Производитель:

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd
#550, Yin Hai Street Hangzhou
Development Area
Economic & Technological
Hangzhou – 310018, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «ДИАВЕТ», 142290,
Московская обл., г.Пушино
мкр-н АБ, д.22, пом.3,
Тел.: +7 (499) 130-05-25,
www.diaikonvet.ru/info@diaikonvet.ru