

Калибратор набора Натрий (Na)

Кат.№: EGC-NA

№ лота: 18-1119

Срок годности: 05/2020

Объем: 2×3 мл

Внешний вид: жидкость

Назначение

Данный продукт предназначен для использования в in-vitro диагностике для калибровки набора Натрий (Na).

Подготовка к использованию

Калибраторы набора Натрий готовы к применению и не требуют дополнительного приготовления.

Хранение и стабильность

Калибратор набора Калий готов к применению и стабилен вплоть до истечения срока годности, указанного на флаконе, при хранении при температуре 2-8°C в закрытом флаконе и в отсутствие загрязнений. Отбирайте из флакона строго необходимое для калибровки количество. После использования НЕ ВЫЛИВАЙТЕ остаток обратно во флакон.

Предупреждения и меры предосторожности

Не раскапывать с помощью рта. Соблюдайте обычные меры предосторожности при обращении с лабораторными реагентами.

Значения калибраторов

Калибраторы	Значения концентрации
Калибратор 1	120 ммоль/л
Калибратор 2	160 ммоль/л