

**REF VILY-402**

Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антител к боррелиозу *Borrelia burgdorferi* (Lyme Ab) у собак, кошек, лошадей, коров в цельной крови, сыворотке или плазме.

**Состав набора:**

- ✓ Экспресс-тест: кассета, упакованная в алюминиевый пакет-10 шт.
- ✓ Пипетка-10 шт.
- ✓ Флакон с капельницей с буферным раствором – 1 шт./1,5 мл.

**Материал для исследования:**


Сыворотка, плазма или цельная кровь. Образцы цельной крови с антикоагулянтом следует анализировать в течение 24 часов после взятия. Если ожидается задержка между отбором образцов и проведением анализа, образец следует хранить в холодильнике от +2 до +8 °С не более 48 часов, но не замораживать. Образцы сыворотки или плазмы должны быть проанализированы, если это возможно, немедленно, в противном случае их необходимо хранить, при температуре от +2 до +8 °С не более 72 часов. Если требуется более длительное хранение, сыворотку и плазму можно заморозить и хранить при температуре минус 20 °С.

**Методика проведения анализа:**

III Убедитесь, что тест-кассета, образец и буфер достигли комнатной температуры (15-30 °С) перед тестированием.

1. Извлеките тест из упаковки и разместите на сухую, ровную поверхность.
2. Укажите идентификационный номер пациента на кассете. Сразу приступайте к выполнению теста.
3. Отберите с помощью пипетки, входящей в набор, 1 каплю исследуемого образца (25 мкл) и внесите образец в лунку экспресс-теста (S).
4. Добавьте 3 капли буферного раствора (120 мкл) с помощью флакона с капельницей в ту же лунку экспресс-теста (S).
5. В течение 10 минут интерпретируйте результаты теста. Интерпретация более чем через 20 минут считается некорректной.

## Интерпретация результатов:

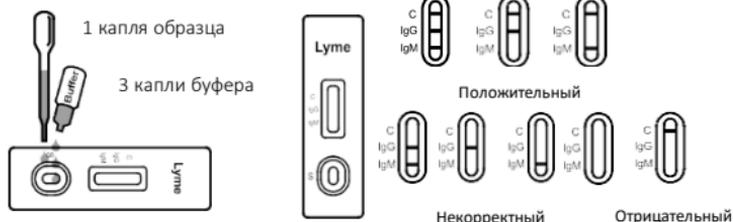

### Положительный:

Положительный результат на IgG/IgM: появляются две цветные линии. Одна линия находится в контрольной области (C), а другая линия в области IgG/ IgM, либо наличие всех трех линий.

Отрицательный: только линия (C) – контрольная В областях IgG и IgM линия не отображается.

Некорректный: полное отсутствие линий, либо отсутствие линии (C) при наличии линий в других областях. Возможен при нарушении условий хранения или проведения анализа. Необходимо провести тест повторно с использованием нового образца и теста.

### Условия хранения:

-Хранить при комнатной температуре, либо в холодильнике (+2-+30 °С).

- Тест стабилен в течение срока годности, указанного на упаковке, и должен оставаться в запечатанном пакете до использования.

- Не замораживать.

### Меры предосторожности:

- ✓ Не использовать после истечения срока годности.
- ✓ Не использовать повторно компоненты набора, не смешивать компоненты из разных серий.
- ✓ Соблюдать установленные меры предосторожности и следовать стандартным процедурам для утилизации отходов класса Б, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Производитель:

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd  
#550, Yinhai Street Hangzhou  
Development Area  
Economic&Technological  
Hangzhou – 310018, P.R. China

Уполномоченный представитель:

**ООО «ДИАВЕТ»**, 142290,  
Московская обл., г.Пуцдино  
мкр-н АБ, д.22, пом.3,  
Тел.: +7 (499) 130-05-25,  
[www.diaikonvet.ru/info@diaikonvet.ru](http://www.diaikonvet.ru/info@diaikonvet.ru)

