

Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антител к бруцеллезу КРС (Bruc Ab) в сыворотке, плазме или молоке.

Состав набора:

- ✓ Экспресс-тест: кассета, упакованная в алюминиевый пакет-1 шт.
- ✓ Пипетка-1 шт.
- ✓ Буферный раствор-1шт.

Материал для исследования:

Сыворотка, плазма или молоко. Образцы сыворотки или плазмы должны быть проанализированы, если это возможно, немедленно, в противном случае их необходимо хранить, при температуре от +2 до +8 °С не более 72 часов. Если требуется более длительное хранение, сыворотку и плазму можно заморозить и хранить при температуре минус 20 °С.


Убедитесь, что образцы не помутнели и не выпали в осадок. Используйте только прозрачные, негемолизированные образцы. Не оставляйте образцы при комнатной температуре на длительное время.

Методика проведения анализа:

!!! Убедитесь, что тест-кассета, образец и буфер достигли комнатной температуры (15-30 °С) перед тестированием.

1. Извлеките тест из упаковки и разместите на сухую, ровную поверхность.
2. Укажите идентификационный номер пациента на кассете. Сразу приступайте к выполнению теста.
3. Отберите с помощью пипетки, входящей в набор сыворотку, плазму или молоко – 3 - 4 капли исследуемого образца (20 мкл), внесите образец в лунку (S) и добавьте 2 - 3 капли буферного раствора (80 мкл) в ту же лунку экспресс-теста (S).
4. В течение 5-10 минут интерпретируйте результаты теста. Интерпретация более чем через 15 минут считается некорректной.

Интерпретация результатов:

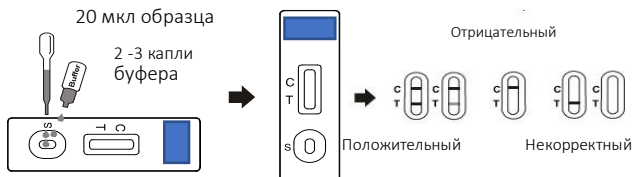

Положительный: две полосы в области тестовой линии (Т) и контрольной линии (С).

Отрицательный: только линия (С) – контрольная.

Некорректный: только линия (Т) – тестовая, либо отсутствие обеих линий. Возможен при нарушении условий хранения или проведения анализа. Необходимо провести тест повторно с использованием нового образца и теста.

Условия хранения:

-Хранить при комнатной температуре, либо в холодильнике (+2-+30 °С).

- Тест стабилен в течение срока годности, указанного на упаковке, и должен оставаться в запечатанном пакете до использования.

- Не замораживать.

Меры предосторожности:

- ✓ Не использовать после истечения срока годности.
- ✓ Не использовать повторно компоненты набора, не смешивать компоненты из разных серий.
- ✓ Соблюдать установленные меры предосторожности и следовать стандартным процедурам для утилизации отходов класса Б, согласно СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Производитель:

ООО «ПрофиЛабТест»
117246, Россия, г.Москва,
Научный проезд, 20, с2

Уполномоченный представитель:

ООО «ДИАВЕТ», 142290,
Московская обл., г.Пушино
мкр-н АБ, д.22, пом.3,
Тел.: +7 (499) 130-05-25,
www.diakonvet.ru/info@diakonvet.ru

