

## Калибровочная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка

### ОПИСАНИЕ

Кат. №	EGC-RBP/S
Лот №	13-1120
Срок годности	08/2015
Упаковка	1×1 мл
Тип реагента	Жидкость

### НАЗНАЧЕНИЕ

Калибровочная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка (RBP/S), используемая только для диагностики in vitro.

### ГОТОВНОСТЬ РЕАГЕНТА

Жидкий реагент, готов к использованию.

### ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Неоткрытый калибратор стабилен вплоть до окончания срока годности при хранении в защищенном от света месте при температуре 2-8 °С.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагент содержит консервант опасный для кожи и слизистой. Консервант может вступать в реакцию со свинцом или медью с образованием потенциально взрывоопасных продуктов, с ним следует обращаться осторожно.

### КОНЦЕНТРАЦИЯ

Наименование	Концентрация (мг/л)
EGC-RBP/S	228,00

Рекомендуется разбавлять следующим образом:

	Калибратор 1	Калибратор 2	Калибратор 3	Калибратор 4	Калибратор 5
Разбавление	Деионизированная вода	1+7	1+3	1+1	Без разбавления
RBP ( мг /л )	0.00	28.50	57.00	114.00	228.00

Beijing Strong Biotechnologies, Inc.

Add: 5/F, KuangYi Building, No.15, Hua Yuan Dong Lu, Haidian District, Beijing 100191, P.R.China

Tel: +86 10 8201 2486 Fax: +86 10 8201 2812

Web: <http://en.bsbe.com.cn/> Email: [overseas@bsbe.com.cn](mailto:overseas@bsbe.com.cn)

CE  
V.4.0