

Калибратор набора Фруктозамин (FRUC)

Кат. №: EGC-FRUC
Срок годности: 09/2019
Внешний вид: жидкость

№ лота: 17-0904
Объем: 1 × 1 мл

Назначение

Данный калибратор предназначен для использования в *in-vitro* диагностике для калибровки набора Фруктозамин (FRUC) в биохимических исследованиях.

Подготовка к использованию

Калибраторы набора Фруктозамин готовы к применению и не требуют дополнительного приготовления.

Хранение и стабильность

Калибратор стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе, при хранении при температуре 2-8°C в темноте.

Предупреждения и меры предосторожности

Только для *in vitro* диагностики. Раствор содержит азид натрия. Избегайте попадания внутрь или контакта с кожей или слизистыми оболочками. Азид натрия может взаимодействовать с припоями на основе свинца и меди, образуя взрывоопасные азиды. В этом случае необходимо промыть металлические поверхности большими количествами воды для предотвращения образования азидов.

Значения калибратора

Кат.№	Значение концентрации
EGC-FRUC	270 мкмоль/л