

## VIDV-502

Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена вируса чумы плотоядных (CDV Ag) в образцах слезной жидкости с конъюнктивы или выделений из носа собак.

### Состав набора:

- ✓ Экспресс-тест: кассета, упакованная в алюминиевый пакет с одноразовой пипеткой - 10 шт.
- ✓ Стерильный ватный тампон - 10 шт.
- ✓ Пробирка с буферным раствором - 10 шт./0,7 мл.

### Материал для исследования:

Слезную жидкость с конъюнктивы либо выделения из носа необходимо собрать с помощью стерильного ватного тампона, входящего в комплект к экспресс – тесту и проанализировать, если это возможно, немедленно, в противном случае их необходимо хранить, при температуре от +2 до +8 °С не более 48 часов. Если требуется более длительное хранение, образец можно заморозить и хранить при температуре минус 20 °С.

### Методика проведения анализа:

!!! Убедитесь, что тест-кассета, образец и буфер достигли комнатной температуры (15-30 °С) перед тестированием.

1. Извлеките тест из упаковки и разместите на сухую, ровную поверхность.
2. Укажите идентификационный номер пациента на кассете. Сразу приступайте к выполнению теста.
3. Отберите с помощью стерильного тампона образцы со слезных желез (желательно из верхних и нижних век) или выделения из носа.
4. Поместите тампон с образцом в пробирку с буферным раствором и тщательно перемешайте.
5. С помощью пипетки, входящей в набор, отберите 3 капли исследуемого образца (120 мкл) и внесите в лунку экспресс-теста (S).
6. В течение 5 - 10 минут интерпретируйте результаты теста. Интерпретация более чем через 15 минут считается некорректной.

## Интерпретация результатов:



**Положительный:** две полосы появляются в области тестовой линии (Т) и контрольной линии (С).

**Отрицательный:** одна полоса в области контрольной линии (С).

**Некорректный:** только линия (Т) – тестовая, либо отсутствие обеих линий. Возможен при нарушении условий хранения или проведения анализа. Необходимо провести тест повторно с использованием нового образца и теста.

### Условия хранения:

-Хранить при комнатной температуре, либо в холодильнике (+2-+30 °С).

- Тест стабилен в течение срока годности, указанного на упаковке, и должен оставаться в запечатанном пакете до использования.

- Не замораживать.

### Меры предосторожности:

- ✓ Не использовать после истечения срока годности.
- ✓ Не использовать повторно компоненты набора, не смешивать компоненты из разных серий.
- ✓ Соблюдать установленные меры предосторожности и следовать стандартным процедурам для утилизации отходов класса Б, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Производитель:

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd  
#550,Yinhai Street Hangzhou  
Development Area  
Economic&Technological  
Hangzhou – 310018, P.R. China

Уполномоченный представитель:

**ООО «ДИАВЕТ»**, 142290,  
Московская обл., г.Пушино  
мкр-н АБ, д.22, пом.3,  
Тел.: +7 (499) 130-05-25,  
[www.diakonvet.ru/info@diakonvet.ru](http://www.diakonvet.ru/info@diakonvet.ru)

