

**REF VIFHW-402**

Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена сердечного червя (кардионематоды) *Dirofilaria immitis* (FHW/CHW Ag) в цельной крови, сыворотке или плазме кошек и собак.

**Состав набора:**

- ✓ Экспресс-тест: кассета, упакованная в алюминиевый пакет-10 шт.
- ✓ Пипетка-10 шт.
- ✓ Флакон с капельницей с буферным раствором – 1 шт./3 мл.

**Материал для исследования:**


Сыворотка, плазма или цельная кровь. Образцы цельной крови с антикоагулянтом следует анализировать в течение 24 часов после взятия. Если ожидается задержка между отбором образцов и проведением анализа, образец следует хранить в холодильнике от +2 до +8 °C не более 48 часов, но не замораживать. Образцы сыворотки или плазмы должны быть проанализированы, если это возможно, немедленно, в противном случае их необходимо хранить, при температуре от +2 до +8 °C не более 72 часов. Если требуется более длительное хранение, сыворотку и плазму можно заморозить и хранить при температуре минус 20 °C.

**Методика проведения анализа:**

III Убедитесь, что тест-кассета, образец и буфер достигли комнатной температуры (15-30 °C) перед тестированием.

1. Извлеките тест из упаковки и разместите на сухую, ровную поверхность.
2. Укажите идентификационный номер пациента на кассете. Сразу приступайте к выполнению теста.
3. Отберите с помощью пипетки, входящей в набор, 1 каплю исследуемого образца (10 мкл) и внесите образец в лунку экспресс-теста (S).
4. Добавьте 3 капли буферного раствора (120 мкл) с помощью флакона с капельницей в ту же лунку экспресс-теста (S).
5. В течение 10 минут интерпретируйте результаты теста. Интерпретация более чем через 10 минут считается некорректной.

## Интерпретация результатов:

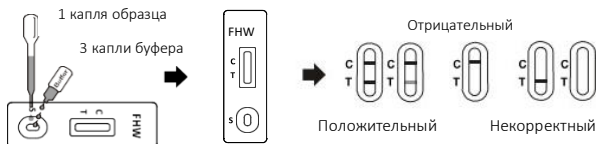

**Положительный:** две полосы в области тестовой линии (Т) и контрольной линии (С).

**Отрицательный:** только линия (С) – контрольная.

**Некорректный:** только линия (Т) – тестовая, либо отсутствие обеих линий. Возможен при нарушении условий хранения или проведения анализа. Необходимо провести тест повторно с использованием нового образца и теста.

### Условия хранения:

-Хранить при комнатной температуре, либо в холодильнике (+2-+30 °С).

- Тест стабилен в течение срока годности, указанного на упаковке, и должен оставаться в запечатанном пакете до использования.

- Не замораживать.

### Меры предосторожности:

- ✓ Не использовать после истечения срока годности.
- ✓ Не использовать повторно компоненты набора, не смешивать компоненты из разных серий.
- ✓ Соблюдать установленные меры предосторожности и следовать стандартным процедурам для утилизации отходов класса Б, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Производитель:

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd  
#550, Yinhai Street Hangzhou  
Development Area  
Economic&Technological  
Hangzhou – 310018, P.R. China

Уполномоченный представитель:

**ООО «ДИАВЕТ»**, 142290,  
Московская обл., г.Пушино  
мкр-н АБ, д.22, пом.3,  
Тел.: +7 (499) 130-05-25,  
[www.diakonvet.ru/info@diakonvet.ru](http://www.diakonvet.ru/info@diakonvet.ru)

