

Как выполнить “обновление системы” Skyla VB1

1. Скачайте файл с новым программным обеспечением и скопируйте его на USB носитель.

Имя файла должно быть вида: `VB1_yyyymmdd_xxxxxx_ASzz.bin`

USB носитель :



2. Вставьте USB носитель в USB разъём расположенный на задней панели прибора.



3. Обновление программного обеспечения Skyla VB-1

(1) Обновление анализатора :

Пожалуйста перейдите на стартовый экран,

затем перейдите: `//HOME/SETTINGS/Admin...Settings/System Upgrade`

после подключения USB носителя, необходимо несколько секунд на его распознавание

если VB1 определит USB носитель, то на экране появится изображение USB

нажмите **YES** для продолжения...



после прибор перезагрузится автоматически...

(2) обновление займёт 7 минут, затем система перезагрузится. Перезагрузка займёт 3 минуты или больше зависит от количества сохранённых результатов в памяти прибора.

(3) Пожалуйста убедитесь что бы питание подавалось бесперебойно в процессе обновления и перезагрузки.

(4) Проверьте версию программного обеспечения после обновления анализатора:

Выберите на экране: **//HOME/SETTINGS/Version**

Software Version : ASzz (new)

Assay Parameter Version : AESww (new)

Это позволит Вам убедиться, что обновление выполнено успешно.

(5) Если произойдёт ошибка, её код появится на экране. Передайте информацию об ошибке поставщику оборудования.

(6) Обновление программного обеспечение НЕ УДАЛИТ ваши данные из анализатора.

Универсальный пароль **5787722** используйте его, если забыли свой.

Если вы не будете вводить пароль в процессе установки нового пароля, то функция защиты паролем отключится.